

DermoXEN®

DERMOXEN Florexil κολπικό ντους
Κολπικό ντους έτοιμο για χρήση - pH 4,0
1 φιάλη 140ml, με απλικατέρ

Το DERMOKSEN® Florexil κολπικό ντους είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που ταξινομείται και κατασκευάζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 / EOK.

Η σύνθεσή του, που περιέχει γαλακτικό οξύ και φυτικά εκχυλίσματα όπως Θυμάρι, εχινάκεια και γαρίφαλο, έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη γυναικεία υγειεινή της ευαίσθητης περιοχής. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, η χρήση του έχει σημαντικά οφέλη και είναι εύχρηστο και ασφαλές για χρήση. Η εφαρμογή είναι εύκολη, λειτουργική και ασφαλής, αικόμα και όταν αυτή πραγματοποιείται σε όχι και τόσο άνετες καταστάσεις (κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, στην εργασία, μετά από αθλητική δραστηριότητα...).

Η εφάπταξ δόση του, σε φιάλη μίας χρήσης και έτοιμη προς χρήση, επιτρέπει την ασφαλή και διακριτή κολπική εφαρμογή. Το DERMOKSEN® Florexil κολπικό ντους είναι ένα γυναικολογικό προϊόν, σχεδιασμένο για την κολπική υγειεινή, το οποίο παρέχει μια ευχάριστη και μακράς διάρκειας αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας. Είναι κοινά δεκτό ότι η χρήση απαλών προϊόντων για κολπικό ντους με φυσιολογικό pH, είναι ένας βολικός τρόπος προστασίας του κολπικού βλεννογόνου κατά των επιθέσεων από εξωτερικούς και παθογόνους παράγοντες. Όταν ακολουθείται σωστά, η προσωπική υγειεινή έχει ως στόχο τη διατήρηση της φυσιολογικής ευεξίας. Σε περίπτωση παθολογικών προβλημάτων συνιστάται συμβουλή για τη χρήση από τον θεράποντα ιατρό.

Η χρήση ενός ντους για την κολπική υγειεινή συνιστάται για τη διατήρηση φυσιολογικών συνθηκών και την πρόληψη ενδεχόμενης αλλοιώσης της ισορροπίας του κόλπου, που συχνά προκαλεί κνησμό, δυσάρεστη οσμή, ερεθισμούς και φλεγμονές.

Το DERMOKSEN® Florexil κολπικό ντους δεν περιέχει χρωστικές ουσίες, είναι μη λιπαρό και δεν λεκιάζει.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Κολπικό ντους με φυτικά ενεργά συστατικά, που προέρχονται από το θυμάρι και το φυτό Echinacea, με γαριφαλέλαιο και γαλακτικό οξύ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το κολπικό ντους χρησιμοποιείται για την υγειεινή, τον καθαρισμό, την απομάκρυνση οσμών και ως αναζωογονητική επικουρική θεραπεία, για την πρόληψη των ερεθισμών και φλεγμονών, που μπορεί να οδηγήσουν σε πιθανές αλλοιώσεις.

Το DERMOKSEN® Florexil κολπικό ντους χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει τις υπερβολικές εκκρίσεις, τα υπολείμματα του αίματος μετά από περίοδο ή για την τοπική υγειεινή μετά τη σεξουαλική συνεύρεση.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



- 1) Σπάστε τη σφραγίδα ασφαλείας κάμπτοντας το καπάκι, κρατώντας το μπουκάλι από το δακτύλιο. (Εικ. 1)
- 2) Τραβήξτε προς τα έξω το απλικατέρ, μέχρι να ακούσετε τον ήχο τοποθέτησης. (Εικ. 2)
- 3) Καθίστε επάνω στον μπιντέ ή σταθείτε στον χώρο ντους, κάνετε την πλύση εισάγοντας το απλικατέρ στον κόλπο και πιέζοντας απαλά το μπουκάλι. (Εικ. 3)
- 4) Απορρίψτε το μπουκάλι μετά τη χρήση.

Για ένα χλιαρό κολπικό ντους, πριν από τη χρήση βυθίστε για λίγο το μπουκάλι το οποίο εξακολουθεί να είναι κλειστό, σε ζεστό αλλά καυτό, νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Κατά τη δάρκεια της εγκυμοσύνης, χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο μετά από συμβουλή γιατρού. Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που υπάρχουν κολπικές πληγές ή τραύματα. Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα, ακόμη και αν έχουν την ίδια χρήση. Να μην γίνεται χρήση του προϊόντος σε περίπτωση δυσανεξίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Μην χρησιμοποιείτε εάν η φιάλη έχει υποστεί ζημιά. Προϊόν μίας χρήσης, αν ξαναχρησιμοποιηθεί δεν μπορεί να εγγυηθεί την ενδεδειγμένη δράση.

Παρτίδα και ημερομηνία λήξης: δείτε την συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 φιάλη εφαρμόζεται χορήγησης που περιέχει 140ml διαλύματος έτοιμου για χρήση με απλικατέρ

ΕΧΕΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ IN VITRO ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αναθ. 2, 11/2015

Παραγωγός:

 **EKUBERG**
pharma s.p.r.l.

Via Pozzelle, 36
73025 Martano (LE) ITALIA
www.dermoxen.com

Αποκλειστική Διάθεση
για την Ελλάδα:

 **MEDWORLD**
Innovative Healthcare Solutions
MEDWORLD O.E.
Λαζαρίου 11,
Νέα Μάρκη, 19005
Τηλ.: 22940 91970
info@medworld.gr
www.medworld.gr

 Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Σύμβολα:

 Μονή δόση

 Ημερομηνία λήξης

 Αριθμός παρτίδας

 Παραγωγός

 Όρια θερμοκρασίας

 Διαβάστε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών που εσωκλείεται