

# DermaXEN®

## VITEXYL

λιπαντικό τζελ για την ευαίσθητη περιοχή

Σε ειδικές στιγμές της ζωής των γυναικών μπορεί να εμφανιστεί ένα ενοχλητικό φαινόμενο: η κολπική ξηρότητα.

Η κολπική ξηρότητα μπορεί να έχει διάφορες αιτίες, μεταξύ των οποίων:

- ορμονικές αλλαγές, ειδικά μετά τον τοκετό, στην περίοδο κλιμακτηρίου ή εμμηνόπαυσης
- στρες και / ή μη ισορροπημένη διατροφή
- κακές συνήθειες (όπως η υπερβολική και παρατεταμένη χρήση ταμπόν και σερβιετών)
- συνήθειες κακής υγιεινής (υπερβολική, κακή ή πολύ συχνή υγιεινή)
- παρουσία διαβήτη

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της λίπανσης του κόλπου που, με τη σειρά του, μπορεί να προκαλέσει ενοχλητικό κάψιμο, κνησμό, ερεθισμό και πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή.

Το **Dermaxen® Vitexyl λιπαντικό gel** είναι ένα καινοτόμο σκεύασμα ειδικά σχεδιασμένο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κολπικής ξηρότητας και των συναφών προβλημάτων της.

Χάρη στη σύνθεσή του με βάση το νερό και στις ενυδατικές και προστατευτικές ιδιότητες του **υαλουρονικού οξέος** στον κολπικό βλεννογόνο, το **Dermaxen® Vitexyl λιπαντικό gel** παρέχει απαλότητα, ελαστικότητα και ενυδάτωση μακράς διάρκειας. Επιπλέον, αποτελεί ένα φράγμα ενάντια σε παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε τροφισμό και φλεγμονή. Εμπλουτισμένο με **εκχύλισμα από Chast tree (λυγαριά)**, πλούσιο σε ενυδατικές, καταπραυντικές και θρεπτικές ουσίες, το **Dermaxen® Vitexyl λιπαντικό gel** βοηθά στη διατήρηση της άνεσης στην ευαίσθητη περιοχή, σχηματίζοντας ένα λεπτό προστατευτικό φιλμ στο σημείο που εφαρμόζεται.

Το **Dermaxen® Vitexyl λιπαντικό gel** έχει μια απαλή σύνθεση με λιπαντικές, ενυδατικές, καταπραυντικές και προστατευτικές ιδιότητες. Δεν περιέχει parabens και θειαζολιόνη. Χωρίς αρώματα και χρωστικές ουσίες, μη λιπαρή σύνθεση που δεν λεκιάζει.. Η ανεκτικότητα του προϊόντος έχει δοκιμαστεί in vivo και in vitro σε κολπικό επιθήλιο. Ελεγμένο για παρουσία νικελίου (περιεκτικότητα λιγότερη από 0,00001%).

Το **Dermaxen® Vitex λιπαντικό gel** είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που ταξινομείται και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 / ΕΟΚ.


## ΣΥΝΘΕΣΗ

Νερό, γλυκερίνη, προπυλενογλυκόλη, πανθενόλη, σορβιτόλη, υαλουρονικό νάτριο, καρβομέρη, Peg-40 υδρογονωμένο καστορέλαιο, δινάτριο EDTA, τριαιθανολαμίνη, βενζοϊκό οξύ, δεϋδροοξικό οξύ, αιθυλεξυλογλυκερίνη, φαινοξυαιθανόλη, αλκοόλη, εκχύλισμα καρπού λυγαριάς.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η καταπολέμηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κοληκική ξηρότητα οποιασδήποτε προέλευσης, όπως καταπραϊντική και μαλακτική θεραπεία. Λόγω της λιπαντικής του δράσης, μπορεί να είναι χρήσιμο για τη βελτίωση της σεξουαλικής επαφής, επειδή βοηθά στην αποφυγή δυσπαρευνίας και τοπικών ερεθισμών.

**Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Dermoxen® Vitecyl λιπαντικό gel κάθε μέρα για τουλάχιστον 7 ημέρες. Στη συνέχεια, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαναλαμβανόμενους κύκλους, αν τα συμπτώματα επανεμφανιστούν ή όπως συνιστάται από το γιατρό σας.**

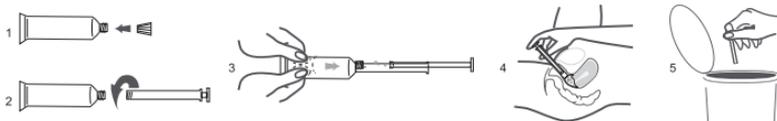

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ανοίξτε το σωλήνα και πιέστε το πάνω μέρος του καλύμματος μέχρι να σπάσει η σφραγίδα.
2. Βιδώστε το διαθέσιμο απλικατέρ στο σωλήνα και πιέστε απαλά για να το γεμίσετε.
3. Αφαιρέστε το απλικατέρ και εισάγετε απαλά και βαθιά στον κόλπο.
4. Πιέστε το έμβολο του απλικατέρ, μέχρι να είναι εντελώς άδειο.
5. Απορρίψτε κατάλληλα το απλικατέρ, το οποίο δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το προϊόν είναι γενικά καλά ανεκτό και δεν προκαλεί ερεθισμό.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση δυσανεξίας σε κάποιο από τα συστατικά. Εάν προκύψει ερεθισμός, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για οποιαδήποτε παρενέργεια που δεν αναφέρεται στο ένθετο της συσκευασίας. Το προϊόν δεν προορίζεται για τη θεραπεία δερματικών βλαβών και δεν συνιστάται να το χρησιμοποιήσετε σε αυτή την περίπτωση.

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΑΝΟΙΧΘΕΙ. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΜΟΝΟΝ ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΙΚΤΗ. ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.**

Παραγωγός:

 **EKUBERG**  
pharma s.a.r.l.

Via Pozzella, 36 73025  
Martano (LE) ITALIA  
www.dermoxen.com

Αποκλειστική Διάθεση  
για την Ελλάδα:



**MEDWORLD**  
Innovative Healthcare Solutions  
MEDWORLD O.E.  
Λυβισίου 11,  
Νέα Μάκρη, 19005  
Τηλ.: 22940 91970  
info@medworld.gr  
www.medworld.gr

Αναθ. 1, 04/03/2015

 Ιατροτεχνολογικό  
πρόϊον



 Ημερομηνία λήξης

 Αριθμός παρτίδας

 Παραγωγός

 Όρια θερμοκρασίας

 Διαβάστε με προσοχή το φύλλο οδηγιών που εσωκλείεται