

Lecoxen®

Επουλωτική κρέμα που χρησιμοποιείται επικουρικά για την ανάπλαση του επιθηλίου του δέρματος

Ενδείξεις

Κρέμα για την ανάπλαση και προστασία του επιθηλίου του δέρματος που εφαρμόζεται στην περιοχή γύρω από την αλλοίωση. Δρα επικουρικά στη θεραπεία, ευνοεί την επανεπιθηλιοποίηση και μειώνει τη φλεγμονή προστατεύοντας το δέρμα από ερεθισμό και βοηθά στη διατήρηση κατάλληλου μικροπεριβάλλοντος στο δέρμα γύρω από την πληγείσα περιοχή ώστε να αποφευχθεί η διαβροχή των ιστών.

Οδηγίες χρήσης

Εφαρμόστε στο δέρμα γύρω από την περιοχή της αλλοίωσης, μία ή περισσότερες φορές την ημέρα ή σύμφωνα με την ιατρική συνταγή. Συνιστάται, επίσης, μετά από υπερβαρική οξυγονοθεραπεία.

Προειδοποίησεις

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά. Να σταματήσετε τη χρήση του προϊόντος σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται από τρίτους, συνιστάται η χρήση γαντιών μιας χρήσης. Πλύνετε τα χέρια σας καλά πριν τη χρήση. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Αν συμβεί τυχαία επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Μην καταπίνετε. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τη συσκευασία ανοιχτή μετά τη χρήση.

Αποθήκευση

Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και από το φως, σε θερμοκρασία μεταξύ 4 ° C και 30 ° C.

Σύνθεση

Mineral Oil, Cyclopentasiloxane, Zeolite, Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Aesculus Hippocastanum Bark Extract, Allium Cepa Bulb Extract, Humectants, Stabilizers, Purified Water to 100.

Συντρητικά: Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Dehydroacetic Acid.

Συσκευασία

Σωληνάριο 30 ml

Αριθμός παρτίδας και ημερομηνία λήξης: δείτε στη συσκευασία
Αναθ. 0, 3/2016

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

 0546

LOT



see the package

Παραγωγός:

 **EKUBERG**
pharma s.r.l.
via Pozzelle, 36
73025 Martano (LE) - Italy
info@ekubergpharma.com
www.ekubergpharma.com

Αποκλειστική Διάθεση
για την Ελλάδα:


MEDWORLD
Innovative Healthcare Solutions
MEDWORLD O.E.
Αυθαίριον 11,
Νέα Μάκρη, 19005
Τηλ.: 22940 91970
info@medworld.gr
www.medworld.gr